



# ГИППО™

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА

---

CE



ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

---

*Our passion - your independence!*

# AKCESMED<sup>®</sup>



---

**ВНИМАНИЕ!** Производитель несет ответственность за правильное функционирование изделия исключительно в случае покупки его у квалифицированного сотрудника фирмы Akces-Med Sp. z o.o или в специальном магазине медицинских изделий.



**ВНИМАНИЕ!** Akces-MED Sp. z o.o. оставляет за собой право введения технических и коммерческих изменений в содержание инструкции без предварительного предупреждения. Любое изменение будет определяться датой последней актуализации.

---

Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее все требования Европейской Директивы (93/42 / EWG) в соответствии с Положением о медицинских изделиях. Производитель предоставил декларацию соответствия ЕС. Обозачение производителя в Управлении по регистрации лекарственных средств изделий медицинского назначения и биоцидов **PL/CA01 04088/W**

---

Фирма AKCES-MED имеет внедренную систему управления качеством согласно с нормами ISO 13485 в процессе проектирования всей продукции , продажи и сервиса. Система сертифицирована Det Norske Veritas.





## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Предназначение инструкции.....	6
2. Рекомендации по использованию изделия.....	6
3. Общее строение специальной коляски Гиппо.....	7
3.1. Стандартное оборудование.....	7
3.2. Дополнительная комплектация.....	8
4. Таблица размеров.....	10
5. Детальное описание обслуживания коляски.....	11
5.1 Раскладывание коляски.....	11
5.2 Складывание коляски для транспортировки.....	13
5.3 Регулировка угла наклона спинки.....	15
5.4 Регулировка подножки.....	15
5.5 Ремни безопасности.....	16
5.6 Состав редуционно-стабилизирующий.....	16
5.7 Ремни подножек.....	17
5.8 Барьер.....	17
5.9 Тормоза.....	18
5.10 Регулировка подголовника.....	18
5.11 Шасси.....	19
5.12 Клин.....	19
5.13 Регулировка ручки коляски.....	19
5.14 Колеса.....	20
5.15 Навес.....	21
5.16 Боковые пелоты.....	21
5.17 Обивка.....	22
5.18 Окошко.....	22
6. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.....	23
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	26
8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	28
9. КОНСЕРВАЦИЯ И ЧИСТКА.....	31





**ГИППО**™

**AKCES**®**MED**



[www.akces-med.com](http://www.akces-med.com)



+48 17 864 04 77



[export@akces-med.com](mailto:export@akces-med.com)



## **ВВЕДЕНИЕ**

---

Коляска **ГИППО™** является инвалидной коляской специального использования. Она предназначена для реабилитации ребенка, а также для облегчения ежедневного ухода за пациентом страдающим заболеваниями, не позволяющими частично либо полностью самостоятельно сидеть или стоять. Благодаря функции стабилизации можно закрепить пациента при помощи элементов коляски во время принятия сидячего или лежачего положений, что позволяет избежать нежелательных сокращений мышц движений и дальнейшего развития деформаций.

Новая коляска **ГИППО™** это более совершенная модель оснащенная дополнительными конструкторскими решениями для увеличения комфорта, использования коляски в ежедневном уходе, например во время прогулок.

Удобство пациента во время прогулок на свежем воздухе обеспечивают вмонтированные амортизаторы минимизирующие вздрагивания во время езды, а также широкий навес, защищающий от солнца и ветра.

Если у Вас возникнут вопросы или замечания, пожалуйста, свяжитесь с медконсультантом нашей фирмы (тел. 508 382 509) или непосредственно с Akces-MED Sp. из o.o. (тел. 17 864 04 70).

Благодарим Вас за покупку нашего изделия.



**ВНИМАНИЕ!** Перед употреблением изделия пользователь обязан ознакомиться с этой инструкцией. Пожалуйста, помните о том, что применение продукта согласно рекомендациям, содержащимся в инструкции, позволяет безопасно его использовать и способствует сохранению его прочности

---





## 1 ПРЕНАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Настоящая инструкция содержит основную информацию: как правильно использоваться коляской **ГИППО™**, подготовить изделие к работе, как хранить и чистить коляску, а также условия гарантии. Руководство это следует хранить в легко доступном месте. Инструкция предназначена для лиц ухаживающих непосредственно за больными детьми, а также для врачей и физиотерапевтов обслуживающих изделие.



**ВНИМАНИЕ!** Перед употреблением изделия пользователь обязан ознакомиться с этой инструкцией. Пожалуйста, помните о том, что применение продукта согласно рекомендациям, содержащимся в инструкции, позволяет безопасно его использовать и способствует сохранению его прочности и эстетике.

## 2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Изделие рекомендуется для больных, у которых установлено:

- ДЦП разных типов
- Повреждения мозга и спинного мозга разного происхождения с параличом конечностей, тяжелой потерей равновесия и координации движений
- Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз и другие)
- Черепно-мозговая грыжа
- Мышечные болезни с сопутствующим параличом и парезом (дистрофия, миастения, миозит).
- Генетические болезни с параличом конечностей
- Дегенеративные и неврологические заболевания
- Другие болезни с сопутствующими параличом, парезом, повреждениями двигательного аппарата
- После черепно-мозговых травм или повреждений позвоночника с повреждением спинного мозга и сопутствующим параличом или парезом





## 3 ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОЛЯСКИ

### 3.1. Стандартное оборудование

1. Раскладная рама с колесами
2. Передние поворотные камерные колеса
3. Блокировка поворота передних колес
4. Шасси с амортизаторами и тормозами
5. Переключаемое сидение
6. Регулируемая подножка
7. Объемная корзина
8. Винируемый межбедренный клин
9. Регулируемая спинка
10. Регулируемые боковые пелоты
11. Пятиточечные ремны
12. Регулируемый подголовник
13. Регулируемый раскладной навес
14. Регулируемая эргономичная ручка
15. Чехол на ноги (стр. 18)
16. Задние камерные колеса
17. Барьер
18. Механизм складывания коляски
19. Блокировка демонтажа передних колес
20. Блокировка демонтажа задних колес
21. Влагозащитная клеенка
22. Сумка
23. Насос
24. Подушки сужающие соедение (Размер 1)
25. Ясничная пелота (Размер 1)





## 3.2. Дополнительная комплектация

 <p><b>Безопасность</b></p>  <p><b>НРО_001</b> Фонарики LED (2 шт.)</p>	  <p><b>НРО_007</b> Автомобильное креселко</p>	 <p><b>Стабилизация</b></p>  <p><b>НРО_101</b> Ремни отводящие бедра</p>
  <p><b>НРО_114</b> Жилет Н</p>	  <p><b>НРО_124</b> Поясничная подушка</p>	  <p><b>НРО_130</b> 4-точечный жилет</p>
  <p><b>НРО_138</b> Подушки сужающие сидение</p>	  <p><b>НРО_137</b> Подушки сужающие сидение</p>	 <p><b>Комфорт</b></p>  <p><b>НРО_402</b> Зонтник</p>
  <p><b>НРО_409</b> Mosquito net</p>	  <p><b>НРО_410</b> Чехол на подголовник</p>	  <p><b>НРО_411</b> Держатель для кружки</p>
  <p><b>НРО_414</b> Столик</p>	  <p><b>НРО_422</b> Гондола</p>	  <p><b>НРО_415</b> Чехол на колеса (4 шт.)</p>







## Расширение



НРО\_600 Дождевик на приставку Buggypod IO



НРО\_601 Приставка Buggypod LITE



НРО\_602 Удлиняющая



НРО\_603 Монтажная петля 70



НРО\_604 Дождевик на приставку



НРО\_605 Адаптационный набор



НРО\_611 Приставка Buggypod PERLE



## Запасные части



НРО\_714 Колесо заднее  
НРО\_715 Шина задняя  
НРО\_716 Камера задняя



НРО\_717 Шина передняя  
НРО\_718 Камера передняя  
НРО\_719 Колесо переднее



## Хранение




НРО\_506 Чехол для хранения коляски в сложенном виде





## 4 ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

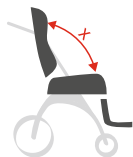

Символ	Расстояние	Единица	Size 1	Size 2
A	Ширина сидения	[cm]	20*, 31	34
	Глубина сидения	[cm]	29	29
	Глубина сидения до клина	[cm]	19	24
C	Высота спинки	[cm]	40*, 45	55
D	Высота подголовника	[cm]	38-46	55-64
E	Ширина спинки (с боковыми петлями)	[cm]	9-18	12-22
	Ширина спинки (без боковых петель)	[cm]	31	34
F	Длина подножки	[cm]	16, 22*	24, 28
	Длина ступни	[cm]	14	18,5
	Высота ручек для ведения	[cm]	100	100
X	Угол наклона спинки	[°]	90-140	90-140
Y	Угол наклона сидения	[°]	15	15
Z	Угол наклона подножки	[°]	90-180	90-180
	Макс. вес пользователя	[kg]	20	30

ГАБАРИТЫ И ВЕС ИЗДЕЛИЯ		Size 1	Size 2
Ширина	[cm]	66	66
Длина	[cm]	109	113
Height	[cm]	105	113
Ширина сложенного изделия	[cm]	66	66
Длина сложенного изделия	[cm]	115	125
Высота сложенного изделия	[cm]	56	56
Высота	[kg]	19,5	22

\* Измерение вместе с подушкой сужающей сидение

Внимание: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.





## 5 ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОЛЯСКИ

### 5.1. Раскладывание коляски

5.1.1. Перед использованием коляски следует разложить часть сидения.

Для этого следует:

**ШАГ 1.** Раскрутить ручки и снять блокирующие шурупы.

**ШАГ 2.** Поднять корпус сидения до совпадения отверстий на обеих частях каркаса. Вложить болты в отверстия и прикрутить ручки по обеим сторонам сидения.

**ШАГ 3.** Застегнуть заслонку.





5.1.2. Для того, чтоб разложить коляску, следует потянуть ручку коляски вверх (фото 4) до щелчка в механизме раскладывания коляски (фото 5).



5.1.3. Сидение устанавливается на каркасе в соответствующих местах конструкции стелаж.

**Сидение устанавливается передом или задом относительно движения.**





## 5.2. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

5.2.1. Нажать рычаги с боку коляски до упора, затем снять сидение (фото 8). Действие повторить с другой стороны.

Сидение снимается вверх (фото 9).



5.2.2. Одновременно потянуть на себя рычаги внизу (фото 10) или наверху (фото 11) конструкции по обеим сторонам каркаса, затем сложить коляску.





Затем складываем ручку коляски вперед (фото 12).

5.2.4. На время транспортировки коляски колеса можно снять (фото 13).



Задние колеса снимаются после нажатия кнопок по середине колес (фото 14, 15).



## 5.3. РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СПИНКИ

### 5.3.1. Adjustment of backrest's tilt angle

Для регулировки угла наклона спинки следует потянуть вверх рычаг находящийся сзади спинки, установить спинку под нужным углом, а затем отпустить рычаг (фото 16).



фото 16

## 5.4. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

### 5.4.1. Регулировка угла наклона

Одновременно нажать кнопки находящиеся по обеим сторонам подножки с целью освобождения петель (фото 17) Освобождение кнопок приведет к блокировке подножки в нужной позиции.



фото 17

### 5.4.2. Регулировка длины

Длина подножки фиксируется в трех местах. Для регулировки длины подножки следует открутить ручки находящиеся сзади подножки и вынуть шурупы из отверстий. Затем подножку следует установить в нужной позиции, переставить шурупы в соответствующие отверстия и вновь закрутить ручки.



фото 18



**ВНИМАНИЕ!** Подножка должна быть всегда закреплена!



## 5.5. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Соединить две пластмассовые части находящиеся вверху ремней (фото 19) и застегнуть их в замок внизу коляски (фото 20).



## 5.6. СОСТАВ РЕДУКЦИОННО-СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ

5.6.1. Коляска снабжена подушкой на сидение и пелотой под поясницу. Редукцию производим для маленький детей для закрепления правильного положения и увеличения комфорта.

Для взрослого ребенка подушки легко снимаются.







## 5.7. РЕМНИ ПОДНОЖЕК

Ремни подножек регулируются с помощью липучек. Подножки фиксируем застегивая ремни накрест (фото 22-24).

**фото 22****фото 23****фото 24**

## 5.8. БАРЬЕР

5.8.1. Перед снятием барьера следует расстегнуть заслонку, предохраняющую от выскользания ребенка (фото 25).

5.8.2. Барьер снимаем путем передвижения фиксаторов вверх и снятия барьера на себя

5.8.3. Place rail on frame's pipes and block locks so as to rail is mounted.

**фото 25**

## 5.9 ТОРМОЗА

6.9.1. Для обездвижения коляски следует нажать рычаг (1) находящийся внизу стеллажа.

6.9.2. Снятие тормоза происходит путем поднятия рычага вверх (2).



фото 26

## 5.10. РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

5.10.1. Регулируется высота подголовника. Для этого следует открутить ручку сзади спинки, затем установить подголовник на нужной высоте и опять прикрутить ручку.

Ручка находится ниже рычага для регулировки угла наклона спинки.



фото 27



фото 28

## 5.11. ШАССИ

5.11.1. Коляска имеет два способа установления шасси. «Комфорт» для езды по неровной поверхности и «Спорт» для передвижения по гладкой поверхности.

Регулировку выполняем с помощью рычага (фото 29), находящегося под пружиной амортизатора.



## 5.12. ФИКСИРУЮЩИЙ КЛИН

5.12.1. Демонтаж фиксирующего клина происходит путем откручивания ручки находящейся под сидением, а затем снятием клина с сидения (фото 30).



## 5.13. РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ КОЛЯСКИ

5.13.1. Для регулировки угла наклона колясочной ручки следует одновременно нажать кнопки находящиеся по обе стороны ручки (фото 31). Освобождение кнопок приведет к блокировке ручки в нужной позиции.



## 5.14. КОЛЕСА

5.14.1. Коляска оснащена блокировкой функции поворота передних колес. Для этого следует повернуть по часовой стрелке рычаг (фото 32) находящийся над колесом.



фото 32

5.14.2. Для снятия блокировки функции поворота передних колес следует повернуть рычаг (фото 33) против часовой стрелки.



фото 33

5.14.3. Демонтаж передних колес происходит путем нажатия кнопок (фото 34) находящихся над колесами в тот момент, когда коляска приподнята, а передние колеса не касаются поверхности.

5.14.4. Монтаж передних колес происходит путем их вставки и зажатия.



фото 34



**ВНИМАНИЕ!** Рекомендованное давление в шинах 1 Bar

## 5.15. НАВЕС

5.15.1. Демонтируется навес путем нажатия кнопок (фото 35) находящихся в нижней части навеса, по обеим сторонам коляски, а затем извлечение навеса из защелок. Монтаж навеса происходит путем нажатия кнопок до щелчка.

5.15.2. Регулировка навеса происходит путем извлечения навеса в нужном направлении до момента его блокировки в соответственном положении.



## 5.16. БОКОВЫЕ ПЕЛОТЫ

5.16.1. Боковые пелоты коляски крепятся с помощью липучек. Это способствует регулировке их положения (фото 36)





## 5.17. ОБИВКА

5.17.1. Чехол, защищающий пациента от неблагоприятных атмосферических условий, пристегивается после демонтажа барьера (5.8.2.). Для того, чтоб пристегнуть чехол следует надеть нижнюю его часть на подножку, затем соединить кнопки верхней части чехла с кнопками находящимися на навесе коляски.



## 5.18. ОКОШКО

5.18.1. В навесе коляски находится окошко для присмотра за ребенком. Для его открытия следует расстегнуть замок (фото 37) по обеим сторонам и заблокировать заслонку застежкой (фото 38). Через открытое окно поступает свежий воздух внутрь коляски.





## 6 МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

### 6.1. REF НРО\_422 ГОНДОЛА

**ШАГ 1.** Раскладываем гондолу устанавливая жесткие проволочки (3) и закрепляем их под держателями на дне гондолы (4) (фото 39).

**ШАГ 2.** затем устанавливаем внутреннюю обивку с помощью липучек и кладем подушку (фото 40).

**ШАГ 3.** Гондола снабжена чехлом предохраняющим от атмосферных явлений. Чехол одевается с помощью защелок (1) по бокам чехла. Защелки следует прикрепить с внутренней стороны навеса гондолы (фото 40).

**ШАГ 4.** Carrycot is mounted in the same way as seat (5.1.3, page 12) (фото 41).

**фото 39****фото 40****фото 42****фото 41**



## 6.2 **REF HPO\_007** Автокресло 0-10 кг

6.21.1. Перед установлением креселка на раме коляски следует закрепить специальные адаптеры по обе стороны креселка (1) (фото 43).



6.21.2. Снимаются адаптеры через освобождение рычагов по бокам коляски (2) (фото 44).



6.21.3. Монтаж/демонтаж креселка на коляске происходит таким же образом как и монтаж сидения (6.1.3) (фото 45).



## 6.3 **REF HPO\_414** МОНТАЖ СТОЛИКА

6.3. Столик устанавливается таким же образом, как и барьер (5.8) (фото 46).





#### 6.4. **REF НРО\_138** Стабилизатор головы с ремнем для головы

Стабилизатор крепится вместо стандартного подголовника. Он оснащен ремнем поддерживающим и стабилизирующим голову.



#### 6.5. **REF НРО\_410** Чехол для подголовника

Чехол защищает подголовник от загрязнения. Он выполнен из мягкого материала, легко одевается на подголовник и крепится с помощью каемки из эластичной резинки.



#### 6.6. **REF НРО\_402** Зонтик

Зонтик защищает ребенка от солнечных лучей. Для его крепления следует расслабить зажим, поместить зонтик на раме коляски, затем установить нужное положение и закрутить ручку.



#### 6.7. **REF НРО\_411** Держатель для крушки,

Для крепления держателя для крушки следует расслабить зажим, поместить держатель на раме ручки коляски. Затем установить его в нужном положении и закрутить ручку. С помощью кнопки можно регулировать положение держателя.





## 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



**ВНИМАНИЕ!** Коляской **ГИППО**<sup>TM</sup> следует пользоваться только согласно настоящей инструкции и только в присутствии подготовленного лица. Перед каждым использованием изделия следует подготовить пациента и изделие!

### 7.1. Подготовка пациента

Перед тем, как пользоваться изделием следует позаботиться о том, чтобы:

- одежда пациента была легкой, свободной, лучше спортивной,
- обувь была удобной, надежно стабилизирующей голеностопный сустав,
- пациент не находился в коляске без одежды охраняющей тело в местах контакта с обивкой для личной гигиены и с целью предотвращения раздражений кожи от контакта с обивкой,
- при наличии канюлей, дренажей, мочеприемников, катетеров следует обратить внимание на то, чтобы их не вырвать, не надавить, не зажать, и чтобы они не мешали во время пользования коляской,
- в случае рекомендации по использованию ортопедического оборудования (шейный воротник, корсет, ортезы, ортопедическая обувь) – одеть их.



**ВНИМАНИЕ!** Одежда должна защищать кожу пациента от непосредственного контакта тела с обивкой и другими

**ВНИМАНИЕ!** Решение по применению определенного ортопедического оборудования принимает лечащий врач!





## 7.2. Инструкция по использованию изделия

1. Для правильного пользования изделием следует:

- разложить коляску;
- установить изделие на ровной поверхности без наклона, оставляя полный доступ к коляске;
- убедиться, что все части коляски исправны, надежно закреплены и неподвижны;
- нажать тормоза;
- приспособить изделие к размерам пациента;
- расстегнуть жилет, ремни туловища и др., чтобы свободно поместить пациента в коляску;
- поместить пациента в коляску;
- застегнуть жилет, ремни туловища, фиксирующие ремни ступней и др.;
- установить дополнительное оборудование коляски, напр.: столик.

2. В случае пациентов «не держащих мочу» следует подложить на сидение специальную клеенку, которую можно купить в аптеке или магазинах с медицинским оборудованием или реабилитационных центрах.

3. Во время использования коляски следует всегда держать ее за ручку, чтобы не покотилась сама.

4. При подъемах или бордюрах следует всегда поворачивать коляску передом к направлению движения.

5. При переезде через бордюры и пороги следует нажать на ручку вниз приподнимая передние колеса, установить их на ступеньке, затем поставить задние колеса, поднимая заднюю часть коляски за ручку вверх.



**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием коляской следует убедиться, что все ремни и предохраняющие средства правильно отрегулированы и застегнуты, а крепления регулируемых элементов надежно закручены!

---





Изделие будет выполнять свою функцию правильно в том случае, если будет приспособлено к росту и весу тела пациента, на что следует обратить внимание при покупке коляски. Главным принципом приспособления коляски является обеспечение пациенту максимального чувства безопасности. Не следует насильно устанавливать положение тела пациента – это может привести к дискомфорту и возникновению неправильной осанки у пользователя.

## 8 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



**ВНИМАНИЕ!** Коляской **ГИППО**<sup>TM</sup> следует пользоваться только согласно прилагаемой к ней инструкции!

Перед решением купить коляску **ГИППО**<sup>TM</sup> следует посоветоваться с врачом специалистом или работником по реабилитации для правильного подбора коляски и ее размера. Перед началом использования коляски следует ознакомиться со всеми указаниями находящимися в данной инструкции.

1. Каждый раз, перед использованием коляски, следует:

- проверить коляску на наличие повреждений или других браков, из-за которых пациенту может угрожать опасность во время пользования коляской. Следует убедиться, что все элементы исправны и правильно закреплены, а изделие не имеет следов трещин или любой деформации;
- проверить, не раскрутились ли шурупы, гайки и другие нарезные, клеенные и шитые соединения;
- проверить исправность тормозов;
- проверить правильно ли работают пряжки;
- всегда пользоваться ремнями безопасности, липучки в этих ремнях должны заходить на себя минимум на 8 см;





- приспособить изделие к размерам и нуждам пациента, напр. установление пелот, подножки и др;
  - убедиться, что подвижные части и ручки для регулировки изделия стабильны и заблокированы;
  - обеспечить надежную стабилизацию пациента посредством: жилета, ремней стабилизирующих ступни, пелот, межбедренного клина, подголовника. Это предохраняет пациента от выпадения или выскальзывания из коляски. В случае возникновения у пациента контрактуры приведения рекомендуется применение отводящего ремня для избежания появления пролежней между колен (с внутренней стороны);
2. Запрещается пользоваться коляской не по назначению!
  3. Запрещается пользоваться изделием при наличии повреждений и если не хватает какой-либо части.
  4. Запрещается оставлять пациента в коляске без присмотра взрослого.
  5. Не следует пользоваться изделием если в поблизости нет обученного опекуна или медицинского персонала.
  6. Запрещается оставлять пациента в коляске на неровной поверхности без опекуна, даже при нажатии тормозов
  7. Запрещается спускаться/подниматься коляской по ступенькам, ни с пациентом, ни без него.
  8. Следует обратить внимание, чтобы во время помещения в коляску и при вставании с коляски пациент не становился на подножке.
  9. Садиться в коляску и вставать из нее следует всегда при нажатом тормозе.
  10. Следует обратить внимание, чтобы во время пользования коляской, конечности пациента не попадали между спицы колес или регулируемые элементы коляски.
  11. Несмотря на то, что изделие вместе с обивкой выполнено из материала не поддерживающего горение, во время пользования следует избегать приближения к открытым источникам огня или высокой температуры. Коляска не должна храниться или использоваться в помещениях с высокой влажностью воздуха.
  12. Во время перевозки коляски без пациента следует надежно предохранить ее от возможных повреждений. Изготовитель не несет ответственности за повреждения возникшие при неправильной защите изделия во время транспорта.





**ВНИМАНИЕ!** Запрещается перевозить пациента в коляске в средствах транспорта (машине, автобусе, поезде).

**ВНИМАНИЕ!** Изделие содержит мелкие части, которые может проглотить ребенок – это опасно!



**ВНИМАНИЕ!** Запрещается изменять что-либо в конструкции коляски – это может быть опасно для пациента и приводит к потере гарантии.

**ВНИМАНИЕ!** Не следует превышать максимально допустимого веса пользователя указанного на заводской табличке, а так же в таблице размеров на стр. 10 инструкции.

- 1) AKCES-MED. Sp. z o.o. продает изделия исправны технически, без конструкционных, монтажных, материальных браков и каких-либо повреждений
- 2) Коляска **ГИППО**<sup>TM</sup> имеет гарантийный срок 24 месяца считая со дня покупки изделия пациентом. В этот период изготовитель гарантирует бесплатный ремонт, согласно гарантийному талону.
- 3) Повреждения возникшие или обнаруженные после 24-месячного срока можно удалить за счет пользователя. Если изделие подлежит программе возвращения финансов, в таком случае Пользователь может подать заявление в НФЗ о возвращении финансов за оплату ремонта изделия, выполненного в рамках послегарантийного сервиса.
- 4) Изготовитель устанавливает срок пользования изделием на 48 месяцев. После этого срока Пользователь может использовать изделие только при условии предъявления изделия Изготовителю для просмотра. После просмотра Изготовитель повторно устанавливает срок пользования изделием и дату следующего просмотра.
- 5) В случае повреждения изделия следует связаться с дилером, у которого было куплено изделие или с Отделом Обслуживания Клиента в фирме AKCES-MED (тел. 17/ 864 04 70).





## 9 КОНСЕРВАЦИЯ И ЧИСТКА

Коляска является медицинским оборудованием, поэтому следует хранить его в чистоте и пользоваться им по инструкции. Изделие хранить в чистом, сухом, вентилируемом помещении. Консервацию и чистку производить минимум раз в месяц. Своевременная чистка коляски необходима для правильного и безопасного функционирования изделия.

Для соблюдения эстетики коляски следует выполнять ее консервацию. Для этого следует выполнять следующее:

1. Рекомендуется мыть обивку теплой водой мягкой тряпкой с применением мягких общедоступных моющих средств. Применение слишком мокрой тряпки приводит к расширению пятен, повреждению обивки или пенки внутри ее. Следует помнить об удалении излишка влаги с ткани перед повторной чисткой. После выведения пятен, обивку ополоскать теплой водой с применением чистой белой тряпки.
2. Обивку не следует замачивать!
3. Не рекомендуется применять твердую щетку.
4. Запрещено чистить обивку сильнодействующими химическими моющими средствами, такими как: растворитель, ядовитые вещества, хлорка.



**CAUTION!** Фирма Akces-MED Sp. z o.o. не несет ответственности за повреждения нанесенные вследствие применения несоответственных моющих средств.

5. Не допускать промокание обивки во время чистки. Каждый раз перед использованием коляски обивка должна быть сухой!
6. Запрещается чистить, производить замену частей, заниматься консервацией коляски во время использования ее пациентом.
7. Металлические и пластмассовые элементы следует чистить вручную с помощью общедоступных моющих средств для искусственных веществ, ознакомившись с указаниями производителя моющих средств.





**ВНИМАНИЕ!** Каждый раз перед использованием коляски обивка всегда должна быть сухой!

Перед использованием изделия следует:

- почистить колеса от грязи;
- проверить, приподняв основу, закручены ли надежно все колеса, не испорчены ли они, блокируют ли тормоза вращающееся колесо;
- убедиться, что деревянные части не имеют выступающих осколков (напр. столик);
- проверить, или конструкция коляски не имеет следов трещин или других деформаций;
- проверить, или все подвижные части двигаются в полном объеме, а все шурупы, гайки, ручки и др. укомплектованы и надежно закручены;
- проверить, или ремни жилета, ремни туловища, ремни стабилизирующие ступни и др. не потерты, изношенные, а пряжки и застежки работают правильно.



**ВНИМАНИЕ!** Производитель несет ответственность только в случае скрытых браков или повреждений вследствие правильного пользования изделием. Только в случае точного следования настоящим рекомендациям, ответственность за правильное функционирование коляски возлагается на производителя.

**ВНИМАНИЕ!** В случае какого-либо повреждения изделия следует связаться с уполномоченным продавцом, у которого было куплено изделие.













**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**



**Akces-MED Sp. z o.o.**

**Jasionka 955B**

**36-002 Jasionka**

**tel. (17) 864 04 77**

[www.akces-med.com](http://www.akces-med.com)

e-mail: [export@akces-med.com](mailto:export@akces-med.com)

Уполномоченный Дилер



Дата издания: **15.07.2013** Дата последней актуализации: **30.03.2016**

*Our passion - your independence!*